
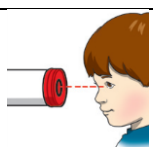
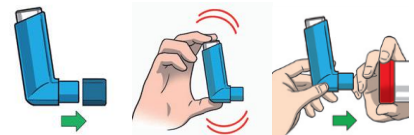
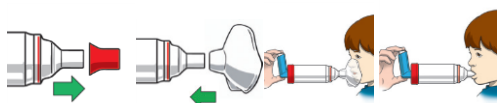
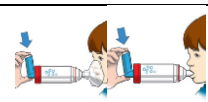
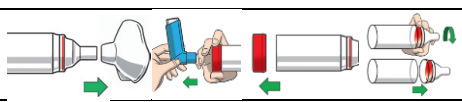

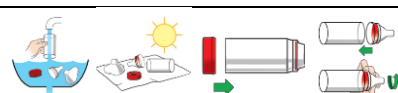


HU	
	<p>Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!</p>
	<p>ANTISZTATIKUS SZELEPES INHALÁLÓ CHAMBER KIMÉRT DÓZISÚ INHALÁTORHOZ</p> <p>A Antiszztatikus chamber B Inhalációs szelep (piros) C Univerzális adapter D Kilégzési vég- NE ZÁRJA LE!</p>
KM-1020/KM-1020B	Standard
KM-1021/KM-1021B	Gyerek 3-6 éves kor
KM-1022/KM-1022B	Újszülött 0-3 éves kor
	Használati Útmutató
	<p>Első használat előtt alaposan ellenőrizzen minden alkatrészt, szelepet és lyukat. Ha valamilyen eltérést talál, cserélje ki az eszközt.</p>
	<p>Távolítsa el a fúvókával ellátott műanyag burkolat kupakját (amelybe előzőleg már behelyezte a gyógyszer tartályt.). Rázza fel a gyógyszer tartályt annak használati utasítása szerint.</p> <p>Csatlakoztassa össze a műanyag burkolatot a chamber Univerzális adapter részével. Győződjön meg arról, hogy jól illeszkednek.</p>
	<p>Távolítsa el a chamber zárókupakját.</p> <p>Csatlakoztassa a Fizio maszkot a chamber szájrészehez. Győződjön meg arról, hogy a biztonsági szelep kinyitható- ha nem, akkor cserélje ki (a piros háromszög a maszkon). Tartsa a maszkot gyermeke arcához. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik. Ha nagyobb gyermekről van szó, a szájába is veheti a chamber szájrészt. Ekkor is győződjön meg a megfelelő illeszkedésről.</p>
	<p>Gyermeke lélegezzen be és ki normális módon. Ezután nyomja meg egyszer a gyógyszer tartályt, és lassan kezdjen el belélegezni. Figyelje a chamber szelepet, hogy valóban megtörténik-e a belégzés. Folytassa gyermeke még 4 belégzéssel (összesen 5 belégzés legyen), úgy, hogy folyamatosan arcánál tartja a maszkot. Egy új dózis befújása előtt várjon, és kövesse kezelőorvosa utasítását a dózisok számával kapcsolatban.</p>
	TISZTÍTÁSI INSTRUKCIÓK
	<p>Első használat előtt tisztítsa meg, és ezután hetente egyszer.</p>
	<p>Távolítsa el az alkatrészeket a rajznak megfelelően, és nyissa szét a chambert.</p>
	<p>Áztassa be az alkatrészeket kímélő tisztítószeres kézmeleg vízbe 15 percre. Óvatosan mozgassa meg benne.</p>
	<p>Öblítse le az alkatrészeket tiszta vízzel. Rázza ki a vizet belőlük, és hagyja őket megszáradni. Ne törölgesse száraz ruhával.</p>

	Bizonyosodjon meg arról, hogy minden megszáradt, mikor újra összeszereli őket. Szerelje össze az alkatrészeket az ábra segítségével, és tárolja sötét, száraz helyen.
	FERTŐTLENÍTÉS
	Áztassa 3%-os hidrogén- peroxidban 30 percig.
	STERILIZÁCIÓ
	A következőkkel sterilizálható: 121 °C-os gőzben, vagy ETO gázzal, vagy plasmával
	ELŐVIGYÁZATOSSÁG
	<p>Mindig kövesse a Használati Útmutatóban leírtakat. Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a FizioChamberrel, mert az apró részek fulladást okozhatnak.</p> <p>Ezt az eszközt egy páciens használhatja. Ne használja más alkatrészekkel, a fertőzés megelőzése érdekében. Cserélje ki az eszközt 2 év folyamatos használat után. Cserélje ki az eszközt, ha megsérült, ha eltömődött a szelep, illetve ha eltérést tapasztal az eredeti állapothoz képest környezeti okok, tárolási okok vagy használati okok miatt,</p> <p>A FizioChamber kezelőorvos javaslatára használható, és figyelni kell a páciens használatában.</p> <p>Egy év után javasolt a szelepet kicserélni (referenciakód: KM-1028).</p>
	KONTRAINDIKÁCIÓK
	Amennyiben az eszközt a Használati Útmutatónak megfelelően és megfelelő célra használják, kontraindikációja nincs.
	INDIKÁCIÓK
	ANTISZTATIKUS SZELEPES INHALÁLÓ CHAMBER KIMÉRT DÓZISÚ INHALÁTORHOZ
	ÖSSZETEVŐK
	<p>7 = ABS 1,4, = Szilikon 2,3,5,6 = Polikarbonát</p>
	<p>1 = PVC 2 = Szilikon</p>
	TÁROLÁS
	Tárolandó: -10°/+45°C között Relatív páratartalom: 30%- 80% között
	ELLENŐRZÉS
	Használat előtt minden alkatrészt ellenőrizzen: nincsenek-e eltörve, nem hibásodtak-e meg. Ha problémát talál, cserélje ki.
	ÉLETTARTAM
	2 év folyamatos használat után ajánlatos kicserélni. 20 ciklusonként kell sterilizálni.
	KIDOBÁS
	Kövesse az érvényes szabályokat a szemétbe dobással kapcsolatban.

